

烧成程序表

▶ 瓷赀冠修复

| 种类 | 烧成种类 | 干燥时间 分 | 起始温度 | | 真空起始温度 | | 升温率 | | 真空值 kPa*1 | 真空解除温度 | | 停留时间 | | 最高温度 | | 冷却时间 分 |
|----|---------------------------------------|-----------|------|------|--------|------|-----|-----|--------------|---------|-----------|------|-----|---------|-----------|-----------|
| | | | 摄氏度 | 华氏度 | 摄氏度 | 华氏度 | 摄氏度 | 华氏度 | | 摄氏度 | 华氏度 | 真空 | 大气 | 摄氏度 | 华氏度 | |
| 1 | 肩台瓷 | 5 | 600 | 1112 | 600 | 1112 | 50 | 90 | 96 | 1000 | 1832 | 1 | 1 | 1000 | 1832 | 4 |
| 2 | 清洗涂敷烧成 | 5 | 600 | 1112 | 600 | 1112 | 45 | 81 | 96 | 930 | 1706 | - | 1 | 930 | 1706 | 4 |
| 3 | 底瓷 | 5 | 600 | 1112 | 600 | 1112 | 45 | 81 | 96 | 930 | 1706 | - | 1 | 930 | 1706 | 4 |
| 4 | 不透明体瓷 ^{*2} | 7-10 | 600 | 1112 | 600 | 1112 | 45 | 81 | 96 | 930-940 | 1706-1724 | - | 1 | 930-940 | 1706-1724 | 4 |
| 5 | 颈部瓷 / 体瓷 / 釉质瓷 ^{*2} | 7-10 | 600 | 1112 | 600 | 1112 | 45 | 81 | 96 | 930-940 | 1706-1724 | - | 1 | 930-940 | 1706-1724 | 4 |
| 6 | 内部染色瓷 | 5 | 600 | 1112 | - | - | 50 | 90 | 0 | - | - | - | - | 900 | 1652 | 4 |
| 7 | 透明瓷 / 乳光瓷 / 透明颈部瓷 / 牙龈瓷 ^{*2} | 7-10 | 600 | 1112 | 600 | 1112 | 45 | 81 | 96 | 930-940 | 1706-1724 | - | 1 | 930-940 | 1706-1724 | 4 |
| 8 | 追加上瓷及微调整 ^{*3} | 7 | 600 | 1112 | 600 | 1112 | 45 | 81 | 96 | 930 | 1706 | - | 0.5 | 930 | 1706 | 4 |
| 9 | 自我上釉 | 5 | 600 | 1112 | - | - | 50 | 90 | 0 | - | - | - | 0.5 | 930 | 1706 | 4 |
| 10 | 外部染色瓷 / 上釉瓷上釉 | 5 | 600 | 1112 | - | - | 50 | 90 | 0 | - | - | - | - | 930 | 1706 | 4 |
| 11 | 修饰粉MRP及增补瓷 | 5 | 600 | 1112 | - | - | 45 | 81 | 0 | - | - | - | - | 880 | 1616 | 4 |

▶ 全赀冠修复

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---------------------|---|-----|------|-----|------|----|-----|----|-----|------|---|---|-----|------|---|
| 12 | 外部染色瓷 | 5 | 600 | 1112 | - | - | 50 | 90 | 0 | - | - | - | - | 850 | 1562 | 4 |
| 13 | 外部染色瓷上釉瓷 E Glaze | 5 | 600 | 1112 | 600 | 1112 | 65 | 117 | 96 | 850 | 1562 | - | 1 | 850 | 1562 | 4 |

注意


以上烧成程序只为指导。实际烧成温度应与所使用烤瓷炉的不同而做相应调整。

*1 96kPa=72cmHg(29 inchesHg)

*2 此烧成条件是针对单冠病例，对于烧成多颗桥体病例时需要调整干燥时间及烧成温度。

*3 这个烧成温度是针对不透明体瓷，颈部瓷，体瓷，釉质瓷，透明瓷，乳光瓷，透明颈部瓷，发育叶瓷，效果瓷以及牙龈瓷的追加上瓷。

CZR

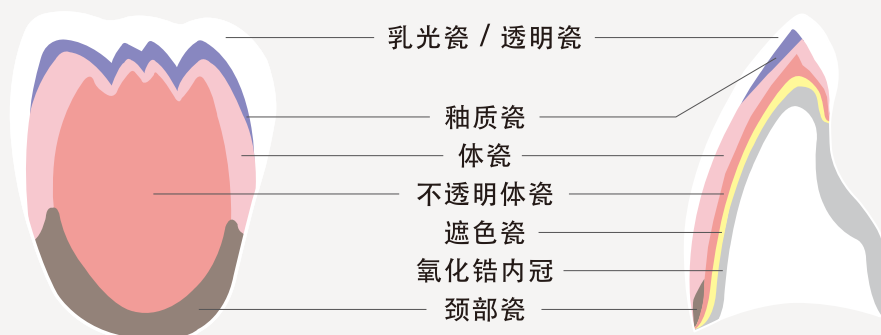

Kuraray Noritake Dental Inc.

300 Higashi-yama, Miyoshi-cho, Miyoshi, Aichi 470-0293, Japan

Website www.kuraraynoritake.com

可乐丽武齿科株式会社

日本爱知县三好市三好町东山 300

使用前请阅读产品随附的使用说明书。

产品的参数及外观会没有通知而变更。

“CERABIEN”是NORITAKE CO., LIMITED的注册商标。

“CERABIEN” is a registered trademark or trademark of NORITAKE CO., LIMITED.